

Kankaisen kasvomasikin huolto

- Ensisijainen vaihtoehto on pesettää kankaiset kasv suojat pesulassa
- Yksikkö voi myös pestä omat kankaiset suojansa tähän tarkoitukseen nimetyllä pesukoneella, jolla ei pestä siivouspyyhkeitä tai asiakaspyykkiä
- Pesu 90:ssa° käyttäen tavallista pyykinpesuainetta. Jos suojat eivät kestä 90 ° pesulämpötilaa, ne voi pestä 60 asteessa käyttäen Erisan Oxy+:aa (1 pss Erisan Oxy+ ja n. ½ annosta pyykinpesujauhetta pesuaineannostelijaan / 5 kg pyykkiä). Vaihtoehtoisesti voi käyttää Omo Professional desinfiioivaa pyykinpesuainetta (10g/l, vaikutusaika 20 min, pesulämpötila 40 astetta)
- Pyykkikoneen täyttöaukko desinfioidaan pyyhkimällä aina ennen kuin pestyt suojat otetaan koneesta. Puhtaat suojakäsineet puetaan desinfioituihin käsiin ennen kuin käsitellään pestyjä suoja
- Kankaiset kasv suojat kuivatetaan kuivurissa tai alueella, jossa ei ole roiskevaaraa. Pestyt ja puhtaat kasv suojat säilytetään joko puhtaissa muovipusseissa tai kannellisissa puhdistettavissa laatikoissa. Suoja käsitellään aina desinfioiduin käsin